

Тест - полоска на выявление беременности



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Вскрыть пакет и достать тест-полоску.
2. Опустить в порцию мочи тест-полоску стрелками вниз до обозначенной линии на 20-30 секунд.
3. Положить полоску на сухую поверхность.
4. Оценить результаты реакции через 1-5 минут, но не позднее 10 минут.



ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 2-30°C

Чернігів, Україна

Полоска для иммунохроматографического определения хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче для ранней диагностики беременности.

Время проведения анализа 5 минут.

Вся продукция соответствует международным стандартам, сертифицирована и одобрена Министерством Здравоохранения Украины.

Удобная форма оплаты. Доставка по Украине.

Тел.: +38(094)988-29-10;

ICQ: 646796005

Price: **2 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Иванова Светлана

8(094)988-29-10